


REVOLUCIONA TU PRÁCTICA CON ALINEADORES INVISIBLES

Sonrisa Digital Lab

SONRISA
Digital Lab 

FLUJO DE PROCESO

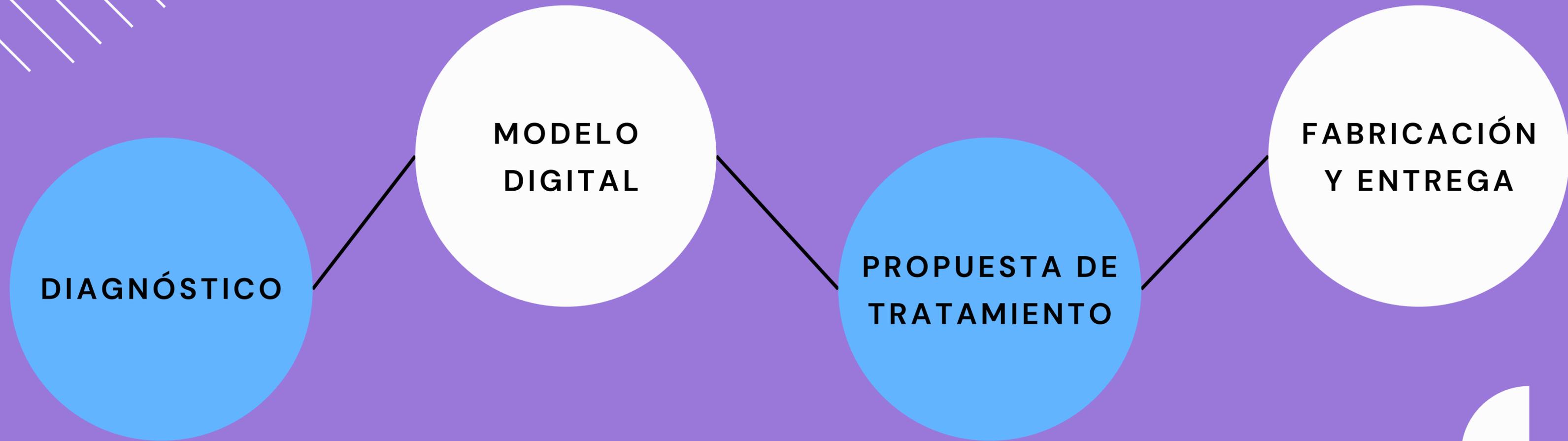

1. DIAGNÓSTICO

Importancia del diagnóstico

- El diagnóstico inicial es fundamental en cualquier tratamiento de ortodoncia con alineadores invisible
- Los alineadores se presentan como una opción terapéutica altamente demandada
- Es importante destacar que la historia ortodóncica previa no descarta la necesidad de nuevos tratamientos en el futuro.
- Un diagnóstico preciso y oportuno fomenta la confianza del paciente y lo motiva a continuar con su tratamiento



8 DE CADA 10
Mexicanos requieren
tratamiento de Ortodoncia

Beneficios

Ofrecer una amplia gama de tratamientos, incluyendo los alineadores invisibles, aumenta la satisfacción del paciente al permitirle realizar múltiples procedimientos en un mismo lugar

Los alineadores invisibles representan una excelente oportunidad para los odontólogos, ya que requieren menos tiempo de atención por parte del profesional, generando así mayores ingresos sin comprometer la calidad de la atención

¿Cuándo Usar Alineadores?

MORDIDAS

Mordidas cruzadas, abiertas, sobremordidas y submordidas

ESPACIOS INTERDENTALES

Diastemas o separaciones dentales

MAL POSICIÓN DENTAL

Dientes torcidos

APIÑAMIENTO DENTAL

Dientes que se amontonan debido a la falta de espacio en la mandíbula

PROBLEMAS DE HABLA Y MASTICACIÓN

Al corregir la alineación dental, se mejora la función oral y se facilita la masticación y el habla

Candidato ideal para utilizar alineadores

Pacientes con:

BUENA SALUD BUCAL Y DENTAL

Buena disciplina de higiene oral, No fumar
Si tienes problemas de salud oral, como caries dentales es importante que los trates antes de comenzar el tratamiento con alineadores

RECAMBIO DENTAL FINALIZADO

Han completado su recambio dental, lo que suele ocurrir entre los 12 y 13 años
Mandíbula madura

Durante la evaluación, el odontólogo debe examinar la estructura dental, tomará radiografías y fotografías si lo cree necesario, y evaluará el historial médico y dental completo

Casos difíciles tratables con alineadores

ENFERMEDAD PERIODONTAL

Los alineadores transparentes pueden beneficiar a los pacientes con enfermedad periodontal, pueden ayudar a reducir la inflamación causada por los dientes desalineados, lo que mejora la salud de las encías y reduce el riesgo de recesión gingival y pérdida de hueso

APIÑAMIENTO SEVERO

Los alineadores enderezan los dientes de forma progresiva, sin necesidad de brackets metálicos fijos. El tratamiento puede oscilar entre 6 y 18 meses, aunque la mayoría de los casos se realizan en 12 meses

BRUXISMO MODERADO

Si el paciente padece de bruxismo en un grado moderado, puede usar los alineadores invisibles. Sin embargo, es importante considerar que los alineadores no son una cura para el bruxismo ***

*** PARA TRATAMIENTO DE BRUXISMO MODERADO RECOMENDAMOS LA LÍNEA NEOALIN

¿Cuándo “NO” usar alineadores?

RAICES CORTAS

Los dientes con raíces cortas pueden no ser aptos para tratamientos con alineadores invisibles. Mover los dientes con raíces cortas puede causar problemas y puede que no sea seguro

BRUXISMO SEVERO

En caso de que éste sea severo, no es recomendable; el paciente podría romper sus placas

HIPERDONCIA

En este tipo de casos, no es posible que el paciente utilice los alineadores invisibles

DIENTES IMPACTADOS

Los dientes impactados o retenidos hacen referencia a cuando el diente no alcanza a salir por completo de la encía, por ende, está torcido y no puede salir de forma apropiada

TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULAR

Estos trastornos son múltiples y dependiendo del caso, pueden ser temporales o crónicos. Sin embargo, no son tratables

2. MODELO DIGITAL

SONRISA
Digital Lab 

Mi paciente es Candidato, ¿Qué sigue?

Para ofrecer un tratamiento de alineadores de alta calidad a tus pacientes, necesitamos un modelo digital preciso de sus dientes.

¡Buenas noticias! Nosotros nos encargamos de todo el proceso de digitalización, sin que tengas que invertir en equipos adicionales

ESCANEEO EN TU CLÍNICA

Si tienes un escáner intraoral, puedes realizar el escaneo tú mismo.

ESCANEEO EN UN LABORATORIO DENTAL

Si no tienes escáner, puedes enviar a tu paciente a un laboratorio dental cercano.

MODELO FÍSICO

Nosotros podemos digitalizar un modelo físico de los dientes de tu paciente sin costo adicional.

Los formatos digitales con los que podemos trabajar son .STL, .OBJ y PLY. Aunque recomendamos el uso de STL

COMUNICACIÓN

Estamos comprometidos con brindar a nuestros clientes la mejor experiencia en odontología digital. Es por eso que hemos implementado Klinikare, una herramienta de vanguardia que revoluciona la forma en que nos comunicamos y colaboramos.

¿POR QUÉ KLINIKARE?

Klinikare es mucho más que una simple plataforma de comunicación; es un ecosistema digital diseñado para optimizar cada etapa del proceso odontológico.

¿POR QUÉ KLINIKARE?

Puedes visualizar en tiempo real el estado de cada uno de tus trabajos. Desde el momento en que se crea la orden hasta su entrega final, tendrás acceso a toda la información relevante

COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA

Olvídate de las llamadas perdidas y los correos electrónicos sin respuesta. Con el chat integrado de Klinikare, puedes comunicarte de manera directa y eficiente con nuestro equipo técnico

GESTIÓN SIMPLIFICADA


Klinikare te permite crear órdenes de trabajo detalladas, adjuntar archivos de cualquier tipo y almacenar una biblioteca de casos clínicos para futuras referencias.

GESTIÓN SIMPLIFICADA

Klinikare se integra de forma sencilla con los principales sistemas CAD/CAM, asegurando un flujo de trabajo digital continuo y optimizado

SOPORTE 24/7

Nuestro equipo de expertos te brindará toda la capacitación necesaria para que puedas aprovechar al máximo todas las funcionalidades de Klinikare. Si tienes alguna duda o inconveniente, nuestro equipo de soporte técnico estará disponible para ayudarte en todo momento

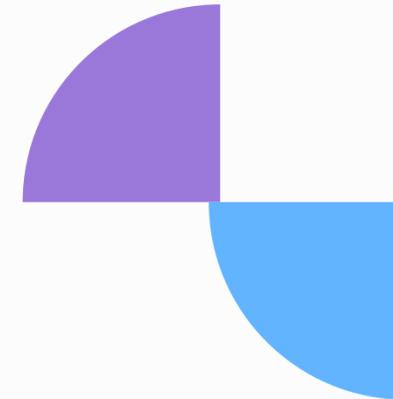



SONRISA
Digital Lab

MODELO
DIGITAL

Klinikare

www.klinikare.com

3. PROPUESTA DE TRATAMIENTO

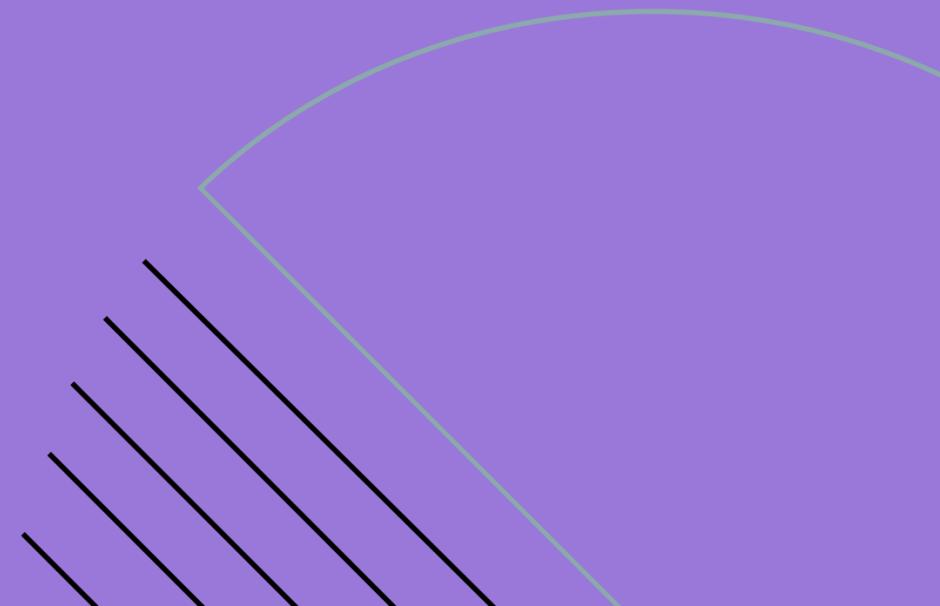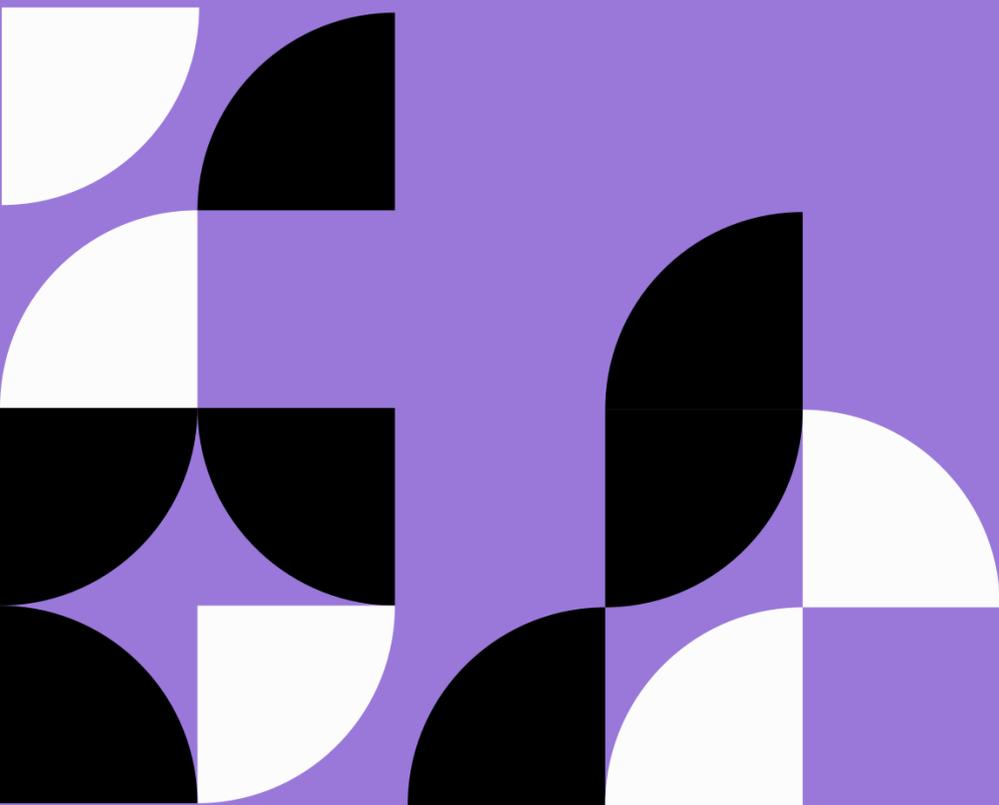

PLAN DE TRATAMIENTO PERSONALIZADO

Una vez recibido el modelo digital, nuestro equipo de expertos elaborará un plan de tratamiento detallado y sin costo adicional, dentro de las primeras 48 horas.

Diagnóstico virtual

Videos 3D que muestran la condición actual y los movimientos dentales propuestos desde múltiples ángulos

Secuencia de tratamiento

Reporte detallado con la cantidad de pasos, movimientos por diente y recomendaciones de stripping (si aplica).

Presupuesto

Costo total desglosado por etapa del tratamiento.

El odontólogo podrá revisar y solicitar modificaciones al plan sin costo adicional. Una vez aprobado, se requerirá un **anticipo del 50% para iniciar la fabricación**

ELECCIÓN DE MARCA

Nuestro laboratorio dental tiene la solución perfecta
Presentamos nuestras 3 marcas de alineadores invisibles. Cada una ha sido cuidadosamente seleccionada por su calidad, innovación

DENTEALINE

- ✓ Acetato Tricapa ATMOS 0.035"
- ✓ Presentación de entrega básica
- ✓ Estuche para alineador básico
- ✓ Personalización de entrega con personalización básica
- ✓ Marca de alineador opcional

WONDERALIGN

- ✓ Acetato ATMOS o ESSIX 0.035"
- ✓ Presentación de entrega Profesional
- ✓ Estuche para Alineador Profesional
- ✓ Aditamentos para colocar Alineadores incluidos
- ✓ Logo de Odontólogo/Clinica en caja y etiquetas
- ✓ Nombre de paciente en caja y etiquetas
- ✓ Reporte personalizado con Logo y nombre.

NEOALIN

- ✓ Acetato ESSIX 0.035" o 0.040"
- ✓ Presentación de entrega Premium
- ✓ Estuche para Alineador Premium
- ✓ Aditamentos para colocar Alineadores incluidos
- ✓ Logo de Clinica en caja y etiquetas brillante recortado con la figura exacta
- ✓ Nombre de paciente en caja y etiquetas brillante recortados con la figura exacta
- ✓ Reporte personalizado con Logo y nombre.
- ✓ Recorte detallado de alineador

Todas las marcas incluyen:

- Diseño digital de tratamiento
- Videos en diferentes vistas de avance de tratamiento
- Reporte digital de apiñamiento para stripping
- Guías de attaches, en caso de requerir

4. FABRICACIÓN Y ENTREGA

SONRISA
Digital Lab 

ENTREGA DE TRATAMIENTO

"Una vez que hayas aprobado tu plan de tratamiento con alineadores, puedes esperar recibirlos en un plazo máximo de 7 días hábiles más el tiempo de envío.

¿CÓMO RECIBIRÁS TUS ALINEADORES?

Entrega personal: Uno de nuestros colaboradores te los llevará directamente.

Envío por paquetería: Recibirás un paquete en tu domicilio.

¡TU SATISFACCIÓN ES NUESTRA PRIORIDAD!

Calidad garantizada: Nos aseguramos de que tus alineadores sean de la más alta calidad

Entrega a tiempo: Cumplimos con los plazos de entrega establecidos.

Solución ante cualquier inconveniente: En caso de algún problema, nos haremos cargo de los gastos de envío y reemplazo total o parcial

¿NECESITAS TUS ALINEADORES MÁS RÁPIDO?

Ofrecemos un servicio de envío exprés en 24 horas para casos urgentes. Aplica un costo adicional.

Pago cómodo:

El 50% restante del tratamiento se paga al recibir tus alineadores y siempre que estés completamente satisfecho con ellos.