



# K Life Patch

Parche de estimulación transcutánea con 3 modos de T.E.N.S. y 2 E.M.S.

SIN CABLES - SEGURO - DISCRETO Y CONFORTABLE - FÁCIL DE PROGRAMAR



## Aplicaciones

- Dolor de espalda, lumbalgia, ciática.
- Dolor cervical.
- Dolor de hombro.
- Dolor de cadera y rodilla.
- Neuralgia.
- Tendinitis, epicondilitis, epitrocleitis.
- Dolores musculares y espasmos.
- Lesiones deportivas.
- Dismenorrea.

El sistema K.Life Patch dispone de cinco programas de estimulación:

**3 modos de T.E.N.S.:** el T.E.N.S. es un método seguro, no invasivo que evita el uso de fármacos. Alivia el dolor por medio de pequeños impulsos eléctricos que pasan a través de los electrodos situados sobre la piel hacia las fibras nerviosas.

**2 modos de E.M.S.:** la Estimulación Eléctrica Muscular trabaja directamente en las neuronas motoras musculares con baja frecuencia lo que hace efecto directamente en el conjunto muscular. Se usa en procesos de rehabilitación y gimnasia pasiva.

Para su aplicación solo tiene que poner su parche en forma de mariposa sobre la zona dolorida y aplicar el tratamiento correspondiente. El K.Life Patch aplica las corrientes automáticamente un tiempo de 30 minutos tras el cual este se apaga. Dispone de selector de programas y de intensidad.

El K.Life Patch funciona con pilas, usted sólo tendrá que obtener recambios del electrodo en forma de mariposa cuando éste pierda su adherencia.





## PROGRAMAS

Programa	Tiempo min.	Frecuencia (Hz)	Anchura de pulso	Modo (TENS)
N	30	80	200	Normal
B	30	2	200	Burst
H	30	2/80	250/200	Han Modular

Pro. Nº	Tiempo min.	Frec. (Hz)	Anchura de pulso	Modo (EMS)	Subida Rampa	Contrac.	Relaj.
E1	30	50	250	EMS	2	5	8
E2	30	20	250	EMS	2	5	8

## Características

- **CANALES:** 1 sólo canal
- **FORMA DE ONDA:** Pulso rectangular bifásico asimétrico
- **ANCHURA DE PULSO:** 200-250 microsegundos.
- **FRECUENCIA:** 2-80 Hz
- **SALIDA DE V.:** Max. 35Vpp hasta 500 Ohm
- **INTENSIDAD:** Ajustable de 0 a 10
- **PROGRAMAS DE ESTIMULACION:** 3 modos T.E.N.S. - 2 modos E.M.S.
- **ALIMENTACION:** 2 baterías AAA (Incluidas).
- **TIEMPO DE TRATAMIENTO:** 30 minutos
- **PARADA AUTOMÁTICA:** 3 minutos
- **DIMENSIONES:** 57x45x16,5 mm.
- **MEDIDAS DEL ELECTRODO:** 55x90 mm.
- **PESO:** 20 gr. – 42 gr. con baterías.



## Compuesto por:

- 1 K Life Patch.
- 2 pilas tipo AAA.
- 2 electrodos de 55x90 mm.
- 1 manual de instrucciones.

### Referencias:

- Kit K Life Patch: FEDES106
- Electrodo K Life Patch: 7112

