

“賽思美德” 傷口敷料 (滅菌)

“SAINSMED” Wound Dressings (Sterile)

產品敘述與描述

本產品用於覆蓋在傷口上以吸收傷口上分泌物；保護傷口免受外界污染。

工作原理

1. 保持創面適度濕潤，不結痂，避免換藥時撕裂新生組織。
2. 覆蓋在傷口上以吸收傷口分泌物。

使用方法

1. 首先清潔雙手，確保操作過程的衛生。
2. 對傷口及其周圍皮膚進行常規消毒，待消毒劑完全乾燥。
3. 根據傷口大小和類型選擇合適型號的敷料。
4. 撕開離型紙，避免手指接觸敷料的膠黏層和與傷口接觸的部分。
5. 將敷料對準傷口，輕輕貼合，從中心向四周撫平，確保敷料與皮膚緊密接觸，避免產生氣泡。
6. 若為無紡布敷料，注意無紡布的位置，使其不影響對傷口的觀察和保護。
7. 一般2-3天更換一次，或當敷料卷邊、滲液外溢、污染時立即更換。
8. 移除：平行皮膚緩慢揭起一側，順勢180°輕柔撕下；如有黏連，可用生理鹽水濕潤邊緣。

警告與注意事項

1. 本品為一次性使用產品，嚴禁重複使用，以防止交叉感染。
2. 本品為無菌提供，使用前需確保傷口及周圍皮膚已進行正確消毒處理。
4. 使用過程中，若傷口出現紅腫、疼痛加劇、滲液增多、化膿等異常情況，應立即停止使用，並及時就醫。
5. 請將本品放在兒童不能接觸到的地方，避免兒童誤拿誤用。
6. 儲存時應保持包裝完好，置於陰涼、乾燥、通風處，遠離火源和熱源。
7. 本品超過有效期後不得使用，請在有效期內使用。

警告與注意事項

1. 對醫用壓敏膠過敏者禁用；
2. 深度、大量滲液或化膿感染傷口禁用；

產品組成

SMD-WD-01: 10%TPU薄膜+80%棉纖維+10%離型紙

SMD-WD-02: 10%無紡布+80%棉纖維+10%離型紙

存儲說明

請將本品存放於通風良好、乾燥且溫度適宜的地方，遠離高溫或火源，避免陽光直射。

保存期限：3年

“賽思美德” 傷口敷料 (滅菌)

“SAINSMED” Wound Dressings (Sterile)

型號	規格	包裝
SMD-WD-0101	4×5cm	50pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0102	6×7cm	50pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0103	6×9cm	50pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0104	10×10cm	50pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0105	10×15cm	50pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0106	10×20cm	50pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0107	10×25cm	50pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0108	10×30cm	50pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0109	10×35cm	50pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0110	10×12cm	20pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0111	15×20cm	20pcs/盒, 20盒/箱

其他尺寸可依臨床需求客製

10%TPU薄膜+80%棉纖維+10%離型紙



型號	規格	包裝
SMD-WD-0201	5×8cm	50pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0202	6×7cm	50pcs/盒, 40盒/箱
SMD-WD-0203	6×8cm	50pcs/盒, 40盒/箱
SMD-WD-0204	9×10cm	20pcs/盒, 40盒/箱
SMD-WD-0205	9×15cm	20pcs/盒, 40盒/箱
SMD-WD-0206	9×20cm	20pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0207	9×25cm	20pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0208	10×10cm	20pcs/盒, 40盒/箱
SMD-WD-0209	10×15cm	20pcs/盒, 40盒/箱
SMD-WD-0210	10×20cm	20pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0211	10×25cm	20pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0212	10×35cm	20pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0213	6.3×9.5cm	50pcs/盒, 40盒/箱
SMD-WD-0214	6×8cm	50pcs/盒, 40盒/箱
SMD-WD-0215	7×9cm	50pcs/盒, 40盒/箱
SMD-WD-0216	12×12cm	20pcs/盒, 20盒/箱
SMD-WD-0217	12×14cm	20pcs/盒, 20盒/箱

其他尺寸可依臨床需求客製

10%無紡布+80%棉纖維+10%離型紙





代理進口商名稱:傑達實業有限公司代理

進口商地址:臺中市西區臺灣大道二段285號22樓之3

代理商電話:04-23150236

E-mail:sales@jetstar. taipei

製造廠名稱: Hubei Enqi Biotechnology Co., Ltd.

製造廠地址:No 103, Unit 1, Building 5, Modern Sino-Canada
Science and Technology Park, East Side of Xianpeng
Highway, Lvwan Community, Shazui Street, Xiantao
City, Hubei Province, China