

“賽思美德” 器械盒及其配件(非滅菌)

“SAINSMED” Surgical Instrument Box And Accessorie (Non-Sterile)

QSD許可編號:QSD17416

衛部醫器陸輸壹字第005326號

產品敘述與用途

本產品用於承載、儲存、運輸醫療器械使用。通過鋁合金/PPSU材質的器械盒搭配相關配件，提供醫療器械承載、固定、防撞擊、防壓等保護，確保醫療器械於承載、儲存、運輸過程中安全且降低器械損耗。

使用方法

- 1.根據醫療器械種類及尺寸選擇適合使用的器械盒，並可搭配相關配件使用。
- 2.將醫療器械平放於器械盒內，並用配件固定醫療器械。
- 3.器械盒使用完畢請存放於乾燥、通風、無腐蝕性氣體環境，避免陽光直射。

產品特性



鋁合金器械盒經過氧化處理，搭配使用醫用器械包布包裝成器械包盤可使用於高溫高壓鍋、環氧乙烷鍋、電漿鍋等消毒方式(使用高溫高壓鍋滅菌方式可搭配吸水紙襯墊來預防或改善濕包狀況)。根據其設計的結構不同有多種呈現空間結構，同時可以選配硅膠墊以及硅膠卡條，給待消毒的器械增設更好的承載與保護，防止衝力撞擊造成精密儀器的損害，並在使用過程中提供防壓、防潮、防塵等保護。



PPSU是一種高性能熱塑性塑料，做成器械盒後,搭配使用醫用器械包布包裝成器械包盤可使用於高溫高壓鍋、環氧乙烷鍋、電漿鍋等消毒方式(使用高溫高壓鍋滅菌方式可搭配吸水紙襯墊來預防或改善濕包狀況)。有著更好的保護器械、降低器械磨損以及使用輕便等優點，並在使用過程中提供防壓、防潮、防塵等保護。



主要有硅膠支架、硅膠墊，該產品由硅膠材料製成，具有耐高溫高壓的特點。廣泛用於器械盒中，對器械起到固定和保護的作用。

警告及注意事項

- 1.鋁合金材質使用環境請勿超過150°C。
- 2.PPSU材質使用環境請勿超過180°C。
- 3.矽膠配件使用環境請勿超過250°C或接觸銳器。

存儲說明

存放於乾燥、通風、無腐蝕性氣體環境，避免陽光直射。

有效期

自生產日期起5年。

產品材質





鋁合金/PPSU/矽膠

“賽思美德” 器械盒及其配件(非滅菌)

“SAINSMED” Surgical Instrument Box And Accessorie (Non-Sterile)

單層器械盒

| 型號 | 規格 (mm) |
|------------|-------------|
| SMD-SBL001 | 250×250×50 |
| SMD-SBL002 | 250×250×70 |
| SMD-SBL003 | 260×160×30 |
| SMD-SBL004 | 270×120×60 |
| SMD-SBL005 | 270×84×42 |
| SMD-SBL006 | 300×200×50 |
| SMD-SBL007 | 300×200×70 |
| SMD-SBL008 | 360×130×70 |
| SMD-SBL009 | 370×230×50 |
| SMD-SBL010 | 370×230×70 |
| SMD-SBL011 | 370×84×42 |
| SMD-SBL012 | 390×84×42 |
| SMD-SBL013 | 400×140×70 |
| SMD-SBL014 | 420×280×50 |
| SMD-SBL015 | 450×120×60 |
| SMD-SBL016 | 450×200×50 |
| SMD-SBL017 | 450×200×70 |
| SMD-SBL018 | 450×280×100 |
| SMD-SBL019 | 450×84×42 |
| SMD-SBL020 | 500×160×70 |
| SMD-SBL021 | 500×250×50 |
| SMD-SBL022 | 500×260×80 |
| SMD-SBL023 | 540×250×100 |
| SMD-SBL024 | 540×250×50 |
| SMD-SBL025 | 540×250×70 |
| SMD-SBL026 | 580×84×42 |
| SMD-SBL027 | 600×140×80 |
| SMD-SBL028 | 600×250×100 |
| SMD-SBL029 | 600×250×50 |
| SMD-SBL030 | 600×300×100 |
| SMD-SBL031 | 650×300×100 |
| SMD-SBL032 | 650×84×42 |
| SMD-SBL033 | 660×140×80 |
| SMD-SBL034 | 700×140×80 |
| SMD-SBL035 | 730×140×50 |

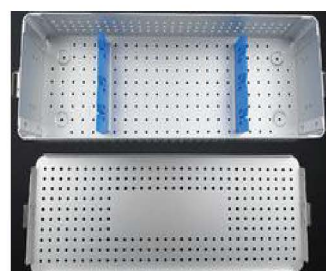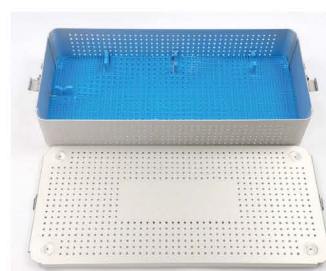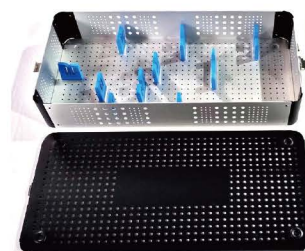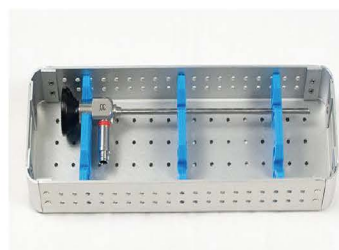

*其他樣式及尺寸可依臨床需求訂製

“賽思美德” 器械盒及其配件(非滅菌)

“SAINSMED” Surgical Instrument Box And Accessorie (Non-Sterile)

雙層器械盒


| 型號 | 規格 (mm) |
|------------|-------------|
| SMD-SBL036 | SMD-SBL036 |
| SMD-SBL037 | SMD-SBL037 |
| SMD-SBL038 | SMD-SBL038 |
| SMD-SBL039 | 420×280×90 |
| SMD-SBL040 | 430×250×140 |
| SMD-SBL041 | 500×230×90 |
| SMD-SBL042 | 535×300×155 |
| SMD-SBL043 | 540×250×100 |
| SMD-SBL044 | 600×250×100 |
| SMD-SBL045 | 600×300×100 |




*其他樣式及尺寸可依臨床需求訂製

三層器械盒

| 型號 | 規格 (mm) |
|------------|-------------|
| SMD-SBL046 | 360×260×90 |
| SMD-SBL048 | 420×280×90 |
| SMD-SBL050 | 540×250×135 |
| SMD-SBL049 | 540×250×140 |
| SMD-SBL047 | 550×250×135 |

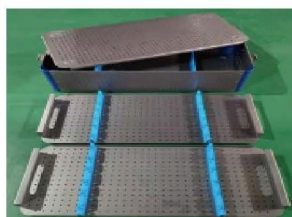

*其他樣式及尺寸可依臨床需求訂製

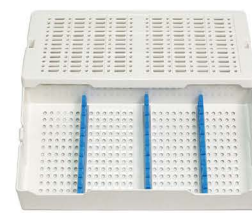

“賽思美德” 器械盒及其配件(非滅菌)

“SAINSMED” Surgical Instrument Box And Accessorie (Non-Sterile)

PPSU器械盒


| 型號 | 規格 (mm) |
|------------|------------|
| SMD-SBP001 | 160×70×22 |
| SMD-SBP002 | 160×90×22 |
| SMD-SBP003 | 220×140×22 |
| SMD-SBP004 | 280×75×45 |
| SMD-SBP005 | 260×160×22 |
| SMD-SBP006 | 260×160×44 |
| SMD-SBP007 | 260×160×50 |
| SMD-SBP008 | 200×110×22 |
| SMD-SBP009 | 450×75×45 |



*其他樣式及尺寸可依臨床需求訂製

通用卡條


| 型號 | 規格 (mm) |
|-------------|---------|
| SMD-SBA-001 | 80 |
| SMD-SBA-002 | 230 |

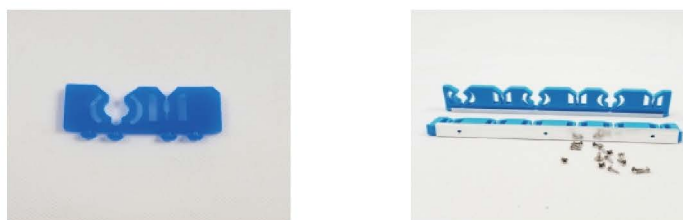

*其他樣式及尺寸可依臨床需求訂製

矽膠墊

| 型號 | 規格 (mm) |
|-------------|---------|
| SMD-SBA-003 | 300×200 |
| SMD-SBA-004 | 540×245 |
| SMD-SBA-005 | 600×300 |
| SMD-SBA-006 | 760×480 |

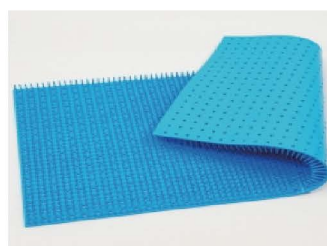

*其他樣式及尺寸可依臨床需求訂製

“賽思美德” 器械盒及其配件(非滅菌)

“SAINSMED” Surgical Instrument Box And Accessorie (Non-Sterile)

器械串

| 型號 | 規格 (mm) |
|------------|---------|
| SM-SBA-007 | 220×70 |
| SM-SBA-008 | 250×95 |
| SM-SBA-009 | 210×160 |
| SM-SBA-010 | 260×160 |



*其他樣式及尺寸可依臨床需求訂製

釘盒

| 型號 | 規格 (mm) |
|------------|-----------|
| SM-SBA-011 | 100×60×30 |



*其他樣式及尺寸可依臨床需求訂製

安全扣環

| 型號 | 規格 (mm) |
|------------|---------|
| SM-SBA-012 | 15 |

*其他樣式及尺寸可依臨床需求訂製





醫療器材商名稱:傑達實業有限公司

醫療器材商地址:臺中市西區臺灣大道二段285號22樓之3

電話:04-23150236

E-mail:sales@jetstar.taipei

製造廠名稱: Hubei Enqi Biotechnology Co., Ltd.

製造廠地址:No 103, Unit 1, Building 5, Modern Sino-Canada
Science and Technology Park, East Side of Xianpeng
Highway, Lvwan Community, Shazui Street, Xiantao
City, Hubei Province, China