

# “賽思美德” 尿液收集器及其附件 (滅菌/未滅菌)

## “SAINSMED” Urine Collector And Accessories (Sterile/Non-Sterile)

### 產品敘述與用途

QSD許可編號:QSD17416  
衛部醫器陸輸壹字第005333號

本產品非用於連接留置導尿管者使用。使用時，患者將收集器（由固定綁帶、尿斗及延長管組裝成型）通過收集器上的固定綁帶將收集器固定在生殖器部位。排尿後，尿液經由收集器的尿斗收集，並通過延長管引流至尿袋中。

### 產品組成

1-SMD-M 男款收集器: 由固定綁帶、尿斗及延長管組裝成型。



3-SMD-A 尿袋



普通尿袋



綁腿尿袋

2-SMD- F 女款收集器: 由固定綁帶、尿斗及延長管組裝成型。



精密尿袋



尿袋引流袋

### 使用方法

- 1.使用前，需檢查產品包裝是否完好，確認產品在有效期內，無破損、污染等情況。
- 2.依照患者的性別及使用需求，選擇合適規格的产品。
- 3.清潔患者會陰部及生殖器周圍皮膚，並確保會陰部及生殖器周圍皮膚乾燥、清潔。
- 4.透過收集器上的固定綁帶將收集器與生殖器部位正確連接，並確保連接緊密，無滲漏。
- 5.通過尿袋連接環將尿袋與收集器上的延長管連接好，調整固定帶，將尿袋妥善固定在患者身上避免移位。
- 6.確保整個引流系統處於通暢狀態，尿袋固定位置應低於患者膀胱位置，以利於尿液順利引流。
- 7.使用過程中，密切觀察尿液的顏色以及尿液量，當尿袋內達到一定尿液量時（不宜超過最大容量的三分之二），應及時更換尿袋或按照醫護人員的指導進行處理。
- 8.若發現產品出現破損、滲漏、連接鬆動等情況，應立即更換。

### 有效期

自生產日期起3年。

# “賽思美德” 尿液收集器及其附件 (滅菌/未滅菌)

## “SAINSMED” Urine Collector And Accessories (Sterile/Non-Sterile)

### 警告與注意事項

- 1.本產品為一次性使用產品，嚴禁重複使用，以防止交叉感染。
- 2.使用時需注意操作環境的清潔衛生。
- 3.使用過程中，如患者皮膚接觸產品部位出現紅腫、瘙癢等過敏反應，應立即停止使用，並諮詢醫護人員。
- 4.請勿將產品用於說明書規定以外的其他用途。

### 存儲說明

存放於通風良好、乾燥且溫度適宜的地方，遠離高溫或火源，避免陽光直射。

### SMD-M-(01-05)

| 型號       | 規格 (mm)           |
|----------|-------------------|
| SMD-M-01 | 收集器               |
| SMD-M-02 | 收集器+普通尿袋500ML*2個  |
| SMD-M-03 | 收集器+普通尿袋2000ML*2個 |
| SMD-M-04 | 收集器+精密1000ML尿袋*2個 |
| SMD-M-05 | 收集器+綁腿1000ML尿袋*2個 |

其他尺寸可依臨床需求客製

### SMD-F-(01-05)

| 型號       | 規格 (mm)           |
|----------|-------------------|
| SMD-F-01 | 收集器               |
| SMD-F-02 | 收集器+普通尿袋500ML*2個  |
| SMD-F-03 | 收集器+普通尿袋2000ML*2個 |
| SMD-F-04 | 收集器+精密1000ML尿袋*2個 |
| SMD-F-05 | 收集器+綁腿1000ML尿袋*2個 |

其他尺寸可依臨床需求客製

### SMD-A-(01-04)

| 型號       | 規格 (mm) |
|----------|---------|
| SMD-A-01 | 普通尿袋    |
| SMD-A-02 | 精密尿袋    |
| SMD-A-03 | 綁腿尿袋    |
| SMD-A-04 | 尿袋引流袋   |

尿袋尺寸：500ML、1000ML、2000ML

其他尺寸可依臨床需求客製



醫療器材商名稱:傑達實業有限公司

醫療器材商地址:臺中市西區臺灣大道二段285號22樓之3

電話:04-23150236

E-mail:sales@jetstar.taipei

製造廠名稱: Hubei Enqi Biotechnology Co., Ltd.

製造廠地址:No 103, Unit 1, Building 5, Modern Sino-Canada  
Science and Technology Park, East Side of Xianpeng  
Highway, Lvwan Community, Shazui Street, Xiantao  
City, Hubei Province, China