

“賽思美德” X光顯影紗布 (滅菌/非滅菌)

“SAINSMED” X-Ray Detectable Gauze (Sterile/Non-Sterile)

產品敘述與用途

QSD許可編號:QSD17416
衛部醫器陸輸壹字第005336號

X光顯影紗布是由網狀纖維製成,並含有X光可偵測之成份,用於體內或手術切口或體內器官組織之控制出血,吸收液體或保護器官組織不受磨損,乾燥或污染。



低致敏性
高吸液性
柔軟易塑形

產品組成

- 材質：由棉纖維、黏膠纖維及X光可顯影材料（顯影線或者顯影片）製成。具體組成如下：
- 棉纖維：纖維素纖維 占比 100% CAS No:9004-04-36
- 黏膠纖維：再生纖維素纖維 占比 100% CAS No:9004-04-36
- 顯影線：硫酸鋇 占比 60% CAS No:7727-43-7 聚氯乙烯 占比 38% CAS No:9002-86-2 普魯士藍 占比 2% CAS No:14038-43-8
- 顯影片：硫酸鋇 占比 60% CAS No:7727-43-7 聚氯乙烯 占比 38% CAS No:9002-86-2 普魯士藍 占比 2% CAS No:14038-43-8



Low sensitization

低致敏止血功能：紗布的纖維狀結構具有低致敏性，控制出血，能夠促使血液迅速凝結，形成一個保護性的血塊，從而達到止血的效果。



High Absorption

高吸收液體功能：紗布的纖維結構超過自身十倍的吸水性，能夠迅速吸收手術區域的液體，防止液體積聚。



Soft and protective to tissue

保護器官組織：選材柔軟，結構密實，可以提供一層保護，防止外部環境對器官組織的損害。

“賽思美德” X光顯影紗布 (滅菌/非滅菌)

“SAINSMED” X-Ray Detectable Gauze (Sterile/Non-Sterile)

工作原理

1. 吸收傷口分泌物，促進傷口乾燥，有助於加速癒合過程。
2. 紗布通過提供物理性隔離，保持傷口的乾淨，防止微生物入侵。

使用方法

1. 根據傷口大小選擇合適的尺寸大小的產品。
2. 在使用X光顯影紗布之前，請確保區域清潔且無污染。
3. 將紗布用鑷子取出，放置於切口或器官組織上，可使用輕輕的按壓或固定器材，確保紗布固定在吸血位置上。
4. 待紗布吸血完成，用鑷子移除紗布，小心地移除或者更換紗布繼續吸血。



禁忌事項

1. 不適用於對紗布材料過敏的患者。
2. 避免長期留置於體內，以免引起組織反應。

警告及注意事項

1. 檢查包裝：使用前檢查紗布的包裝是否完整無損，並確認有效期限。
2. 無菌操作：在打開和使用紗布時，應保持手部清潔並在無菌環境下操作，以防傷口感染。
3. 一次性使用：紗布為一次性使用產品，使用後應適當處理，不可重複使用。
4. 使用指南：根據傷口的大小和性質，選擇合適的紗布規格和類型。
5. 附著於本產品上的絲線用於辨識目的。不要拉扯絲線以將其自傷口取出。
6. 不可在手術過程中剪裁本產品。沒有X光可視標記的碎片可能會進入傷口中。未能偵測並移除這些碎片可能造成異物反應。
7. 在放入手術區域之前應清點所有本產品數量，並在從手術區域取出後再清點。未清點本產品數量可能導致額外的手術。
8. 在手術關合之前應計算手術前後的所有本產品數量。如果清點數量不符並無法定位本產品時，可以使用放射影像儀器(X-ray)來定位本產品。只有不透射線標記在成像上可以被看見。不透射線標記的大小和位置可能會影響它們的可視性。

保存環境與條件

1. 應存放於乾燥、清潔、通風良好的環境中。
2. 避免極端的溫度條件，如過熱或過冷。
3. 避免長時間暴露於直射日光下。

“賽思美德” X光顯影紗布 (滅菌/非滅菌)

“SAINSMED” X-Ray Detectable Gauze (Sterile/Non-Sterile)

REF: SMD-GS01

密度:18×13,28×28,28×24,26×18,24×20,30×30

型號	規格	包裝數量
SMD-GS0101	2"×2" 8ply 12ply 16ply	2/5/10/100 片/袋
SMD-GS0102	3"×3" 8ply 12ply 16ply	
SMD-GS0103	4"×4" 8ply 12ply 16ply	
SMD-GS0104	10cm×20cm 16ply	
SMD-GS0105	10cm×10cm 16ply	
SMD-GS0106	7.5cm×15cm 16ply	
SMD-GS0107	7.5cm×7.5cm 16ply	
SMD-GS0108	5cm×5cm 16ply	
SMD-GS0109	3寸紗布卷	
SMD-GS0110	2寸紗布卷	



產品組成: 98%棉纖維 + 2%顯影線

*Y型或其他尺寸可以依據客戶需求定制

REF: SMD-GS02

型號	規格	包裝數量
SMD-GS0201	1cm 帶卡板	5/PK, 50 Pks/Cs
SMD-GS0202	1.5cm 帶卡板	5/PK, 50 Pks/Cs
SMD-GS0203	2cm 帶卡板	5/PK, 50 Pks/Cs
SMD-GS0204	¾"	5/PK, 100 Pks/Cs
SMD-GS0205	⅞"	5/PK, 100 Pks/Cs
SMD-GS0206	1"	5/PK, 100 Pks/Cs
SMD-GS0207	1¼"	5/PK, 100 Pks/Cs
SMD-GS0208	方形小号	5/PK, 100 Pks/Cs
SMD-GS0209	方形中号	5/PK, 100 Pks/Cs
SMD-GS0210	圓形大号 1"	5/PK, 100 Pks/Cs
SMD-GS0211	圓形特大号 1¼"	5/PK, 100 Pks/Cs



產品組成: 98%棉纖維 + 2%顯影線

*其他尺寸可以依據客戶需求定制

“賽思美德” X光顯影紗布 (滅菌/非滅菌)

“SAINSMED” X-Ray Detectable Gauze (Sterile/Non-Sterile)

REF: SMD-GS03

型號	規格	包裝數量
SMD-GS0301	8cm 长 × 2cm 宽 × 1.5cm 厚	1/Pk, 100 Pks/Cs
SMD-GS0302	10cm 长 × 2cm 宽 × 1.5cm 厚	1/Pk, 100 Pks/Cs
SMD-GS0303	4cm 长 × 2cm 宽 × 1.5cm 厚	1/Pk, 100 Pks/Cs

產品組成: 60%棉纖維 + 39%黏膠纖維 + 1%顯影線

*其他尺寸可以依據客戶需求定制



REF: SMD-GS04

型號	規格	包裝數量
SMD-GS0401	5cm × 4.5m/5m/10m	
SMD-GS0402	7.5cm × 4.5m/5m/10m	24/8/12 PK, 100 Pks/Cs
SMD-GS0403	10cm × 4.5m/5m/10m	24/8/12 PK, 100 Pks/Cs
SMD-GS0404	15cm × 4.5m/5m/10m	
SMD-GS0405	20cm × 4.5m/5m/10m	
SMD-GS0406	2cm × 5cm	5/Pk, 100 Pks/Cs
SMD-GS0407	3cm × 5cm	5/Pk, 100 Pks/Cs
SMD-GS0408	5cm × 5cm	5/Pk, 100 Pks/Cs
SMD-GS0409	7.5cm × 5cm	

產品組成: 95%棉纖維 + 5%顯影線

*其他尺寸可以依據客戶需求定制



“賽思美德” X光顯影紗布 (滅菌/非滅菌)

“SAINSMED” X-Ray Detectable Gauze (Sterile/Non-Sterile)

REF: SMD-GS05 ×光顯影帶尾線

型號	規格	包裝數量
SMD-GS0501	1/2" × 1/2"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0502	1/2" × 1"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0503	1/2" × 1 1/2"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0504	1/2" × 3"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0505	3/4" × 3/4"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0506	1" × 1"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0507	1" × 3"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0508	1 1/2" × 1 1/2"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0509	3" × 3"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0510	1/4" × 1 1/2"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0511	1/2" × 2"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0512	1/4" × 3"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0513	3/4" × 3"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0514	1/4" × 1/4"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0515	1" × 2"	10/PK, 20 Pks/Cs

產品組成: 70%棉纖維 + 25%黏膠纖維 + 5%顯影線

*其他尺寸可以依據客戶需求定制




REF: SMD-GS05 ×光顯影不帶尾線

型號	規格	包裝數量
SMD-GS0516	1/2" × 6"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0517	1/2" × 6"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0518	1" × 6"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0519	1/2" × 6"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0520	1 1/2" × 6"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0521	3" × 6"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0522	2" × 6"	10/PK, 20 Pks/Cs
SMD-GS0523	3 1/2" × 6"	10/PK, 20 Pks/Cs

產品組成: 70%棉纖維 + 25%黏膠纖維 + 5%顯影線

*其他尺寸可以依據客戶需求定制

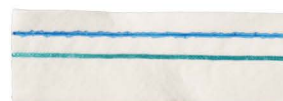

“賽思美德” X光顯影紗布 (滅菌/非滅菌)

“SAINSMED” X-Ray Detectable Gauze (Sterile/Non-Sterile)

REF: SMD-GS06

型號	規格	包裝數量
SMD-GS0601	4" × 18"	5/Pk, 20 Pks/Cs
SMD-GS0602	8" × 36"	5/Pk, 20 Pks/Cs
SMD-GS0603	8" × 108"	5/Pk, 20 Pks/Cs
SMD-GS0604	18" × 18"	5/Pk, 20 Pks/Cs
SMD-GS0605	18" × 36"	5/Pk, 20 Pks/Cs
SMD-GS0606	18" × 36"	3/Pk, 25 Pks/Cs
SMD-GS0607	18" × 36"	2/Pk, 25 Pks/Cs

產品組成: 95%棉纖維 + 3%顯影線 + 2%顯影片

*其他尺寸可以依據客戶需求定制



REF: SMD-GS07

型號	規格	包裝數量
SMD-GS0701	0.8" × 6"	5/Pk, 20 Pks/Cs
SMD-GS0702	1.2" × 8"	5/Pk, 40 Pks/Cs
SMD-GS0703	1.2" × 12"	5/Pk, 40 Pks/Cs
SMD-GS0704	8" × 36"	5/Pk, 20 Pks/Cs
SMD-GS0705	12" × 12"	5/Pk, 20 Pks/Cs
SMD-GS0706	12" × 12"	5/Pk, 40 Pks/Cs
SMD-GS0707	4" × 18"	5/Pk, 20 Pks/Cs
SMD-GS0708	4" × 18"	5/Pk, 40 Pks/Cs
SMD-GS0709	4" × 18"	5/Pk, 40 Pks/Cs

產品組成: 95%棉纖維 + 3%顯影線 + 2%顯影片

*其他尺寸可以依據客戶需求定制





醫療器材商名稱:傑達實業有限公司

醫療器材商地址:臺中市西區臺灣大道二段285號22樓之3

電話:04-23150236

E-mail:sales@jetstar.tapei

製造廠名稱: Hubei Enqi Biotechnology Co., Ltd.

製造廠地址:No 103, Unit 1, Building 5, Modern Sino-Canada
Science and Technology Park, East Side of Xianpeng
Highway, Lvwan Community, Shazui Street, Xiantao
City, Hubei Province, China