

**Canetas Marcadoras de Pele Viscot
Tinta Tradicional - Estéreis**

Importado e Distribuído por: MEM Cirúrgica Ltda.

Rua Professor Gustavo Pires de Andrade 869, térreo e 1º andar - Parque da Vila Prudente

CEP 03140-010 - São Paulo – SP

CNPJ: 04.733.376/0001-66

Fabricado por: Viscot Medical, LLC.

32 West St.

East Hanover, NJ 07936 - USA

Modelos Comerciais

1437SRL6 - Caneta Marcadora de Pele Viscot, Ponta Regular, c/ Régua e Etiqueta, Estéril;

1437SR - Caneta Marcadora de Pele Viscot, Ponta Regular, c/ Régua, Estéril;

1436SRL9 - Caneta Marcadora de Pele Viscot, Ponta Ultrafina, c/ Régua e Etiqueta, Estéril;

1425SRL9 - Caneta Marcadora de Pele Viscot, Ponta Dupla Regular e Ultrafina, c/ Régua e Etiqueta, Estéril;

1424SR - Caneta Marcadora de Pele Viscot BlephMarker, Ponta Dupla Ultrafina e Ultrafina, c/ régua, Estéril.

1407 - Caneta Marcadora de Pele Viscot, Ponta Regular, Tinta Azul, com Régua, Estéril.

Apresentação Comercial

Comercializadas em caixa de papel cartão com unidades estéreis embaladas individualmente em embalagem Tyvek.

Características

- Tinta Violeta Genciana resistente à solução preparatória;
- Não tóxica, não tatua, não irrita, não mancha;
- Design ergonômico não rolante;

- Incinerável; não contém metais pesados ou látex.

Características de Desempenho: Marca da tinta roxa clara e visível.

Indicação de Uso

Marcação de locais anatômicos em pele intacta antes de procedimentos cirúrgicos.

Marcador de tinta tradicional com ponta Ultrafina

- Produto estéril destinado ao uso dentro da sala cirúrgica ou onde a esterilidade precisa ser mantida;
- Marcação de pacientes antes da cirurgia em ambiente não estéril;
- Procedimentos oftalmológicos, otorrinolaringológicos e plásticos;
- Procedimentos onde são utilizadas soluções de preparação menos agressivas como Betadine® ou Iodo;
- Procedimentos onde é necessária uma linha muito tênue.

Marcador de tinta tradicional de ponta Regular

- Produto estéril destinado ao uso dentro da sala cirúrgica ou onde a esterilidade precisa ser mantida;
- Procedimentos onde são utilizadas soluções de preparação menos agressivas como Betadine® ou Iodo;
- Marcação dos pacientes antes da cirurgia;
- Marcação de pacientes dentro da sala cirúrgica;
- A maioria das aplicações cirúrgicas, desde cirurgia geral até cirurgia plástica.

Marcador de tinta tradicional com ponta Dupla Regular e Ultrafina

- Produto estéril destinado ao uso dentro da sala cirúrgica ou onde a esterilidade precisa ser mantida;
- Marcação de pacientes antes da cirurgia em ambiente não estéril;
- Procedimentos faciais como lifting facial;
- Procedimentos oftálmicos onde você pode precisar marcar a lente tórica, o rosto e/ou o instrumento de marcação da córnea;
- Cirurgias que necessitam de linhas de marcação médias e ultrafinas em seus procedimentos.

Marcador de tinta tradicional com ponta Dupla Ultrafina e Ultrafina

- Produto estéril destinado ao uso dentro da sala cirúrgica ou onde a esterilidade precisa ser mantida;
- Marcação de pacientes antes da cirurgia em ambiente não estéril;
- Cirurgia Plástica - procedimentos faciais que exigem linhas finas e detalhadas;
- Procedimentos oftálmicos;
- Quaisquer procedimentos que exijam uma linha mais fina;
- Indicado para eliminar o estresse e o custo de usar um segundo marcador de ponta ultrafina durante um procedimento devido ao entupimento da ponta com gorduras, óleos ou qualquer umidade na pele.

Utilizador Pretendido

Para ser utilizado por clínicos em pacientes cirúrgicos.

Princípio de Funcionamento

As canetas contêm tinta de Violeta Genciana resistente que permite que as marcações persistam após os procedimentos preparatórios como, esfregar e aplicar a solução preparatória.

Modo de Uso do Produto

1. Remova a oleosidade da pele do paciente com álcool ou água e sabão e deixe a área secar;
2. Marque os locais das incisões conforme necessário. Deixe a tinta secar completamente;
3. Preparar o paciente com antisséptico como requerido para a cirurgia. As marcas de tinta podem desbotar ligeiramente, mas permanecem legíveis;
4. Descarte a caneta juntamente com os dispositivos cirúrgicos gerais, de acordo com o protocolo da Instituição.

Composição

Tubo, tampa: polietileno de alta densidade (PEAD).

Tinta marcadora de pele: CI Violeta Básico 3 - (Nº CAS) 548-62-9;

Propan-2-ol - (Nº CAS) 67-63-0.

Esterilização: por raio gama.

Prazo de validade: 3 anos.

Especificações Técnicas

Nº Ref.	Descrição	Comprimento (cm)	Diâmetro (cm)	Peso un. (g)	Ponta – Traço (mm)
1437SRL6	Caneta Marcadora de Pele Viscot, Ponta Regular, c/ Régua e Etiqueta, Estéril.	13	0,8	5	0,6
1437SR	Caneta Marcadora de Pele Viscot, Ponta Regular, c/ Régua, Estéril.	13	0,8	5	0,6
1436SRL9	Caneta Marcadora de Pele Viscot, Ponta Ultra Fina, c/ Régua e Etiqueta, Estéril.	13,2	0,9	3	0,3
1425SRL9	Caneta Marcadora de Pele Viscot, Ponta Dupla Regular e Ultra Fina, c/ Régua e Etiqueta, Estéril.	13,6	1,0	6	0,3 / 0,6
1424SR	Caneta Marcadora de Pele Viscot BlephMarker, Ponta Dupla Ultra Fina e Ultra Fina, c/ régua, Estéril.	14,3	0,8	6	0,3 / 0,3
1407	Caneta Marcadora de Pele Viscot, Ponta Regular, Tinta Azul, com Régua, Estéril.	13,5	1,1	7	0,6
VF500SR	Caneta Marcadora de Pele Viscot Visflow expremível, Ponta Regular, com Régua.	9,0	1,0	4	0,6

Condições de Manipulação

Sem requisitos especiais. A instituição deve seguir seu procedimento local padrão de descarte de material médico-hospitalar.

Advertências

- O marcador é para uso externo, não para uso interno.
- Considerar se o paciente é sensível à Violeta Genciana;
- Não utilizar caso o produto estiver vencido;
- Descarte após o uso;
- A reutilização de um dispositivo de uso único poderia resultar em infecção/contaminação e/ou falha do dispositivo que poderia causar danos ao paciente;
- Qualquer incidente grave que ocorra com o dispositivo deve ser comunicado ao importador;
- O produto contém tinta violeta de genciana.

Precauções

- A tinta marcadora de pele deve ser aplicada sobre a pele intacta e seca antes da aplicação da solução preparatória. A tinta marcadora de pele não irá aderir à solução preparatória ou à pele úmida;
- Preparar a pele com álcool isopropanol antes da marcação pode aumentar a aderência da tinta à pele;
- Quando a solução de preparação é aplicada sobre a tinta marcadora de pele, algumas das marcações poderão borrar, mas a tinta marcadora de pele continuará visível.

Contraindicações

- Não apropriado para utilização em recém-nascidos.

SAC:

(11) 5539-7557

sac@memcirurgica.com.br

