

Canetas Marcadoras de Pele Viscot Visflow Tinta Tradicional - Estéreis

Importado e Distribuído por: MEM Cirúrgica Ltda.

Rua Professor Gustavo Pires de Andrade 869, térreo e 1º andar - Parque da Vila Prudente

CEP 03140-010 - São Paulo – SP

CNPJ: 04.733.376/0001-66

Fabricado por: Viscot Medical, LLC.

32 West St.

East Hanover, NJ 07936 - USA

Modelo Comercial

VF500SR - Caneta Marcadora de Pele Viscot Visflow espremível, Ponta Regular, com Régua, Estéril.

Apresentação Comercial

Comercializadas em caixa de papel cartão com unidades estéreis embaladas individualmente em embalagem Tyvek.

Características

- Tinta Violeta Genciana resistente à solução preparatória;
- Não tóxica, não tatua, não irrita, não mancha;
- Design ergonômico não rolante;
- Incinerável; não contém metais pesados ou látex.

Características de Desempenho: Marca da tinta roxa clara e visível.

Indicação de Uso

Marcação de locais anatômicos em pele intacta antes de procedimentos cirúrgicos.

Marcador de tinta tradicional de ponta Regular VF500SR

- Produto estéril destinado ao uso dentro da sala cirúrgica ou onde a esterilidade precisa ser mantida;
- Marcação de pacientes antes da cirurgia em ambiente não estéril;
- Criado para eliminar obstrução das canetas devido a sangue, gordura e outros fluidos no campo operatório;
- Cilindro de aperto fácil de segurar, projetado para direcionar a tinta de volta para a ponta, permitindo assim que o cirurgião continue a marcar o paciente;
- Indicado para abdominoplastia;
- Indicado para procedimentos de mama;
- Qualquer procedimento intraoperatório que requeira marcação em tecido úmido.

Utilizador Pretendido

Para ser utilizado por clínicos em pacientes cirúrgicos.

Princípio de Funcionamento

As canetas contêm tinta de Violeta Genciana resistente que permite que as marcações persistam após os procedimentos preparatórios como, esfregar e aplicar a solução preparatória.

Modo de Uso do Produto

1. Remova a oleosidade da pele do paciente com álcool ou água e sabão e deixe a área secar;
2. Marque os locais das incisões conforme necessário. Deixe a tinta secar completamente;
3. Preparar o paciente com antisséptico como requerido para a cirurgia. As marcas de tinta podem desbotar ligeiramente, mas permanecem legíveis;
4. Localizar a incisão diretamente ao lado da linha marcada;
5. Caso o procedimento exija, marcar os locais internos de incisão pressionando o meio da caneta de marcação cirúrgica Visflow para aumentar o fluxo da tinta facilitando a marcação;
6. Após a operação, descarte a caneta juntamente com os dispositivos cirúrgicos gerais, de acordo com o protocolo da Instituição.

Composição

Tubo, tampa: polietileno de alta densidade (PEAD).

Tinta marcadora de pele: CI Violeta Básico 3 - (Nº CAS) 548-62-9;

Propan-2-ol - (Nº CAS) 67-63-0.

Esterilização: por raio gama.

Prazo de validade: 3 anos.

Especificações Técnicas

Nº Ref.	Descrição	Comprimento (cm)	Diâmetro (cm)	Peso un. (g)	Ponta – Traço (mm)
VF500SR	Caneta Marcadora de Pele Viscot Visflow expremível, Ponta Regular, com Régua.	9,0	1,0	4	0,6

Condições de Manipulação

Sem requisitos especiais. A instituição deve seguir seu procedimento local padrão de descarte de material médico-hospitalar.

Advertências

- O marcador é para uso externo e para uso interno;
- Considerar se o paciente é sensível à Violeta Genciana;
- Não utilizar caso o produto estiver vencido;
- Descarte após o uso;
- A reutilização de um dispositivo de uso único poderia resultar em infecção/contaminação e/ou falha do dispositivo que poderia causar danos ao paciente;
- Qualquer incidente grave que ocorra com o dispositivo deve ser comunicado ao Importador.

Precauções

- Preparar a pele com álcool isopropanol antes da marcação pode aumentar a aderência da tinta à pele;
- Quando a solução de preparação é aplicada sobre a tinta marcadora, algumas das marcações poderão borrar, mas a tinta marcadora de pele continuará visível.

Contraindicações

- Não apropriado para utilização em recém-nascidos.

SAC:

(11) 5539-7557

sac@memcirurgica.com.br