

**Canetas Marcadoras de Pele Viscot
Tinta Resistente XL - Não Estéreis**

Importado e Distribuído por: MEM Cirúrgica Ltda.

Rua Professor Gustavo Pires de Andrade 869, térreo e 1º andar - Parque da Vila Prudente

CEP 03140-010 - São Paulo – SP

CNPJ: 04.733.376/0001-66

Fabricado por: Viscot Medical, LLC.

32 West St.

East Hanover, NJ 07936 - USA

Modelos Comerciais

1470XLRED - Caneta Marcadora de Pele Viscot Mini XL, Ponta Regular, Tinta Vermelha, Não Estéril.

1450XL - Caneta Marcadora de Pele Viscot Mini XL, Ponta Regular, Não Estéril.

1447XL – Caneta Marcadora de Pele Viscot XL, Ponta Regular, Não Estéril.

1448XL – Caneta Marcadora de Pele Viscot XL, Ponta Ultra Fina, Não Estéril.

1449XL – Caneta Marcadora de Pele Viscot XL, Ponta Grossa, Não Estéril.

1456XL – Caneta Marcadora de Pele Viscot Mini XL, Ponta Ultra Fina, Não Estéril.

1447XLG - Caneta Marcadora de Pele Viscot XL, Ponta Regular, Tinta Verde, Não Estéril.

1447XLR - Caneta Marcadora de Pele Viscot XL, Ponta Regular, Tinta Vermelha, Não Estéril.

Apresentação Comercial

As canetas marcadoras XL não estéreis são embalados em recipientes de plástico transparente.

Características

- Tinta Violeta Genciana resistente à solução preparatória;
- Não tóxica, não tatua, não irrita, não mancha;
- Design ergonômico não rolante;
- Incinerável; não contém metais pesados ou látex.

Características de Desempenho: Marca da tinta clara e visível.

Indicação de Uso

Marcação de locais anatômicos em pele intacta antes de procedimentos cirúrgicos.

Marcador Mini de tinta resistente de ponta Regular

- Qualquer procedimento onde preparações agressivas como CHG possam ser usadas;
- Fornecendo uma alternativa econômica e ecológica aos marcadores cirúrgicos de pele em tamanho real;
- Marcação do local cirúrgico conforme recomendado pelo Protocolo da Comissão Conjunta para Marcação Correta do Local;
- Procedimentos ortopédicos e de coluna;
- Procedimentos de cirurgia plástica que incluem marcação extensa (ou seja, lista de mamas, abdominoplastias etc.);
- Lipoaspiração.

Marcador Mini de tinta resistente de ponta Ultrafina

- Qualquer procedimento onde preparações agressivas como CHG possam ser usadas;
- Fornecendo uma alternativa econômica e ecológica aos marcadores cirúrgicos de pele em tamanho real;
- Marcação do local cirúrgico conforme recomendado pelo Protocolo da Comissão Conjunta para Marcação Correta do Local;
- Procedimentos de Blefaroplastia;
- Procedimentos ortopédicos e de coluna;
- Procedimentos de cirurgia plástica onde linhas finas podem ser preferidas.

Marcador de tinta resistente de ponta Regular

- Qualquer procedimento onde preparações agressivas como CHG possam ser usadas;

- Marcação do local cirúrgico conforme recomendado pelo Protocolo da Comissão Conjunta para Marcação Correta do Local;
- Procedimentos ortopédicos e de coluna;
- Procedimentos de cirurgia plástica que incluem marcação extensa (ou seja, lista de mamas, abdominoplastias etc.);
- Lipoaspiração.

Marcador de tinta resistente de ponta Grossa

- Qualquer procedimento onde preparações agressivas como CHG possam ser usadas;
- Marcação do local cirúrgico conforme recomendado pelo Protocolo da Comissão Conjunta para Marcação Correta do Local;
- Procedimentos vasculares e varizes;
- Procedimentos ortopédicos e de coluna;
- Procedimentos de cirurgia plástica com foco na mama.

Marcador de tinta resistente de ponta Ultrafina

- Qualquer procedimento onde preparações agressivas como CHG possam ser usadas;
- Marcação do local cirúrgico conforme recomendado pelo Protocolo da Comissão Conjunta para Marcação Correta do Local;
- Procedimentos ortopédicos e de coluna;
- Procedimentos de cirurgia plástica onde linhas finas podem ser preferidas.

Utilizador Pretendido

Para ser utilizado por clínicos em pacientes cirúrgicos.

Princípio de Funcionamento

As canetas contêm tinta de Violeta Genciana resistente que permite que as marcações persistam após os procedimentos preparatórios como, esfregar e aplicar a solução preparatória.

Modo de Uso do Produto

1. Remova a oleosidade da pele do paciente com álcool ou água e sabão e deixe a área secar;
2. Marque os locais das incisões conforme necessário. Deixe a tinta secar completamente antes de preparação;
3. Preparar o paciente com antisséptico como requerido para a cirurgia. As marcas de tinta podem desbotar ligeiramente, mas permanecem legíveis;
4. Descarte a caneta juntamente com os dispositivos cirúrgicos gerais, de acordo com o protocolo da Instituição.

Composição

Tubo, tampa: polietileno de alta densidade (PEAD).

Tinta marcadora de pele: Componente Proprietário - (Nº CAS) Segredo Comercial;

Água - (Nº CAS) 7732-18-5;

CI Violeta Básico 3 - (Nº CAS) 548-62-9;

Diazolidinil ureia - (Nº CAS) 78491-02-8.

Prazo de validade: 5 anos.

Especificações Técnicas

Nº Ref.	Descrição	Comprimento (cm)	Diâmetro (cm)	Peso un. (g)	Ponta – Traço (mm)
1470XLRED	Caneta Marcadora de Pele Viscot Mini XL, Ponta Regular, Tinta Vermelha, Não Estéril.	10,3	0,8	2	0,6
1450XL	Caneta Marcadora de Pele Viscot Mini XL, Ponta Regular, Não Estéril.	10,3	0,8	3	0,6
1447XL	Caneta Marcadora de Pele Viscot XL, Ponta Regular, Não Estéril.	13,5	1,0	7	0,6
1448XL	Caneta Marcadora de Pele Viscot XL, Ponta Ultrafina, Não Estéril.	13,5	1,0	7	0,3
1449XL	Caneta Marcadora de Pele Viscot XL, Ponta Grossa, Não Estéril.	13,5	1,0	6	1,0
1456XL	Caneta Marcadora de Pele Viscot Mini XL, Ponta Ultrafina, Não Estéril.	10,3	0,8	3	0,3
1447XLG	Caneta Marcadora de Pele Viscot XL, Ponta Regular, Tinta Verde, Não Estéril.	13,5	1,0	7	0,6
1447XLR	Caneta Marcadora de Pele Viscot XL, Ponta Regular, Tinta	13,5	1,0	7	0,6

	Vermelha , Não Estéril.				
--	-------------------------	--	--	--	--

Condições de Manipulação

Sem requisitos especiais. A instituição deve seguir seu procedimento local padrão de descarte de material médico-hospitalar.

Advertências

- Para uso em apenas um único paciente para evitar infecção;
- Descarte após o uso;
- O marcador é para uso externo, não para uso interno;
- A superfície da pele deve estar limpa e seca antes de marcar a pele;
- Considerar se o paciente é sensível à Violeta Genciana;
- Não utilizar caso o produto estiver vencido;
- Qualquer incidente grave que ocorra com o dispositivo deve ser comunicado ao Importador.

Precauções

- A tinta marcadora de pele deve ser aplicada sobre a pele intacta e seca antes da aplicação da solução preparatória. A tinta marcadora de pele não irá aderir à solução preparatória ou à pele úmida;
- Preparar a pele com álcool isopropanol antes da marcação pode aumentar a aderência da tinta à pele;
- Quando a solução de preparação é aplicada sobre a tinta marcadora de pele, algumas das marcações poderão borrar, mas a tinta marcadora de pele continuará visível.

Contraindicações

- Não apropriado para utilização em recém-nascidos.

SAC:

(11) 5539-7557

sac@memcirurgica.com.br