

## **Canetas Marcadoras de Pele Viscot Tinta Tradicional - Não Estéreis**

**Importado e Distribuído por:** MEM Cirúrgica Ltda.

Rua Professor Gustavo Pires de Andrade 869, térreo e 1º andar - Parque da Vila Prudente

CEP 03140-010 - São Paulo – SP

CNPJ: 04.733.376/0001-66

**Fabricado por:** Viscot Medical, LLC.

32 West St.

East Hanover, NJ 07936 - USA

### **Modelos Comerciais**

1451 - Caneta Marcadora de Pele Viscot Mini, Ponta Regular, Não Estéris.

1406 - Caneta Marcadora de Pele Viscot, Ponta Regular, Tinta Azul, Não Estéris.

MMF050C - Caneta Marcadora de Pele Viscot Mini, Ponta Ultrafina, Não Estéris.

K4387R - Caneta Marcadora de Pele Viscot, Ponta Regular, com Régua, Não Estéris.

### **Apresentação Comercial**

Os marcadores cirúrgicos não estéreis são embalados em recipientes de plástico transparente.

### **Características**

- Tinta Violeta Genciana resistente à solução preparatória;
- Não tóxica, não tatua, não irrita, não mancha;
- Design ergonômico não rolante;
- Incinerável; não contém metais pesados ou látex.

**Características de Desempenho:** Marca da tinta clara e visível.

## **Indicação de Uso**

Marcação de locais anatômicos em pele intacta antes de procedimentos cirúrgicos.

### Mini marcadores de tinta tradicional, ponta Regular

- Marcação facial;
- Procedimentos onde são utilizadas soluções de preparação menos agressivas como Betadine® ou Iodo;
- Fornecendo uma alternativa econômica e ecológica aos marcadores cirúrgicos de pele em tamanho real;
- Marcação dos pacientes antes da cirurgia em ambiente não estéril;
- Cirurgia de Mohs e outros procedimentos dermatológicos;
- Procedimentos oftalmológicos.

### Mini marcadores de tinta tradicional, ponta Ultrafina

- Procedimentos onde são utilizadas soluções de preparação menos agressivas como Betadine® ou Iodo;
- Procedimentos de cirurgia plástica onde linhas finas podem ser preferidas;  
Procedimentos oftalmológicos;
- Fornecendo uma alternativa econômica e ecológica aos marcadores cirúrgicos de pele em tamanho real;
- Marcação dos pacientes antes da cirurgia em ambiente não estéril.

### Marcador de tinta tradicional de ponta Regular

- Procedimentos onde são utilizadas soluções de preparação menos agressivas como Betadine® ou Iodo;
- Marcação do local cirúrgico conforme recomendado
- Marcação dos pacientes antes da cirurgia;

## **Utilizador Pretendido**

Para ser utilizado por clínicos em pacientes cirúrgicos.

### Princípio de Funcionamento

As canetas contêm tinta de Violeta Genciana resistente que permite que as marcações persistam após os procedimentos preparatórios como, esfregar e aplicar a solução preparatória.

### Modo de Uso do Produto

1. Remova a oleosidade da pele do paciente com álcool ou água e sabão e deixe a área secar;
2. Marque os locais das incisões conforme necessário. Deixe a tinta secar completamente;
3. Preparar o paciente com antisséptico como requerido para a cirurgia. As marcas de tinta podem desbotar ligeiramente, mas permanecem legíveis;
4. Descarte a caneta juntamente com os dispositivos cirúrgicos gerais, de acordo com o protocolo da Instituição.

### Composição

Tubo, tampa: polietileno de alta densidade (PEAD).

Tinta marcadora de pele: CI Violeta Básico 3 - (Nº CAS) 548-62-9;

Propan-2-ol - (Nº CAS) 67-63-0.

**Esterilização:** Não estéril.

**Prazo de validade:** 5 anos.

### Especificações Técnicas

Nº Ref.	Descrição	Comprimento (cm)	Diâmetro (cm)	Peso un. (g)	Ponta – Traço (mm)
1451	Caneta Marcadora de Pele Viscot Mini, Ponta Regular, Não Estéril.	10,2	0,8	3	0,6
1406	Caneta Marcadora de Pele Viscot, Ponta Regular, Tinta Azul, Não Estéril.	13,5	1,1	7	0,6
MMF050C	Caneta Marcadora de Pele Viscot Mini, Ponta Ultrafina, Não Estéril.	8,9	0,9	2	0,3

### **Condições de Manipulação**

Sem requisitos especiais. A instituição deve seguir seu procedimento local padrão de descarte de material médico-hospitalar.

### **Advertências**

- Para uso em apenas um único paciente para evitar infecção;
- Descarte após o uso;
- O marcador é para uso externo, não para uso interno;
- A superfície da pele deve estar limpa e seca antes de marcar a pele;
- Considerar se o paciente é sensível à Violeta Genciana;
- Não utilizar caso o produto estiver vencido;
- Qualquer incidente grave que ocorra com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro em que o utilizador/paciente está estabelecido.

### **Precauções**

- A tinta marcadora de pele deve ser aplicada sobre a pele intacta e seca antes da aplicação da solução preparatória. A tinta marcadora de pele não irá aderir à solução preparatória ou à pele úmida;
- Preparar a pele com álcool isopropanol antes da marcação pode aumentar a aderência da tinta à pele;
- Quando a solução de preparação é aplicada sobre a tinta marcadora de pele, algumas das marcações poderão borrar, mas a tinta marcadora de pele continuará visível.

### **Contraindicações**

- Não apropriado para utilização em recém-nascidos.

### **SAC:**

(11) 5539-7557

[sac@memcirurgica.com.br](mailto:sac@memcirurgica.com.br)