

EyeGard - Protetor Ocular

Importado e Distribuído por: MEM Cirúrgica Ltda.

Rua Professor Gustavo Pires de Andrade, 869 - Parque da Vila Prudente

CEP 03140-010 - São Paulo - SP

Fabricado por: Marketlab, Inc.

6850 Southbelt Drive

Caledonia, MI 49316, USA.

Modelos Comerciais

SH49369 - EyeGuardian.

Apresentação Comercial

Cada par do protetor ocular está disposto sobre um papel kraft de liberação revestido em um lado de argila branqueada. O S2020 - EyeGard é comercializado com 100 unidades (50 pares) por caixa e o SH49369 - EyeGuardian com 200 unidades (100 pares) por caixa. A caixa é feita de papel cartão revestido de celulose branqueada.

Indicação de Uso

EyeGard é utilizado para proteção dos olhos do paciente durante a cirurgia. Garante que o olho do paciente esteja fechado para reduzir o risco de ressecamento e, potencialmente, de abrasão da córnea.

Princípio de Funcionamento

EyeGard é feito de um material hipoalergênico, à prova d'água, respirável e livre de látex, que pode ser usado em todos os pacientes. A forma oval e o material flexível e fino proporcionam um bom ajuste e vedação ao redor dos olhos para máxima proteção. Não há necessidade de cortar o protetor ou adicionar fita adesiva sobre ele. Proporciona uma barreira respirável resistente a fluidos e, o material transparente permite verificar se o olho está adequadamente fechado durante a cirurgia. O protetor é feito com uma formulação especial de adesivo grau médico que protege e é suave para a pele fina e frágil ao redor dos olhos e para os cílios. A aba não adesiva facilita a aplicação, reposicionamento e remoção mesmo com as mãos molhadas ou enluvadas.

MEM Cirúrgica Ltda.

TEL: 11 5539-7557 – Email: memcirurgica@memcirurgica.com.br
www.memcirurgica.com.br

Modo de Uso

1. Descole o protetor ocular da folha de liberação usando a tab colorida;
2. Delicadamente coloque-o sobre o olho aplicando uma leve pressão sobre a pálpebra e nas bordas do protetor;
3. Para remover ou reposicionar puxe a tab colorida descolando o protetor. Se removendo, descarte de acordo com o protocolo do hospital. Se reposicionando, repita o passo 2.

Composição

O protetor ocular EyeGard é feito de um filme de Polipropileno transparente. É revestido em um lado com um adesivo acrílico de grau médico sensível a pressão e no outro lado com silicone peso base de 78 lb. A aba não adesiva é feita de polietileno de alta densidade natural.

Especificações Técnicas

Ref.	Descrição	Tamanho	Dimensão (C x L)cm	Adesividade (Peel adhesion)	PÇS/Cx	Aba não adesiva
SH49369	EyeGuardian	Único	5,5 x 2,9	> 700g/in	200 (100 pares)	Azul escuro

Esterilização: N/A

Validade: 3 anos

Condições de Armazenamento e Transporte

Armazene na embalagem de proteção original a temperaturas entre 10-26,6 °C e 40-60% de umidade relativa.

Condições de Manipulação

O produto deve ser descartado após o uso conforme o procedimento local padrão de descarte de material médico-hospitalar estabelecido pela Instituição.

Advertências

Observe a correlação da versão da instrução de uso indicada no rótulo do produto adquirido e a deste Manual.

Contraindicações

MEM Cirúrgica Ltda.

TEL: 11 5539-7557 – Email: memcirurgica@memcirurgica.com.br
www.memcirurgica.com.br

Não devem ser usados em feridas.

Precauções

Não usar em pacientes com alergia conhecida aos componentes do protetor ocular.

Efeitos Adversos

Alergia em paciente alérgico aos componentes do protetor ocular.

Notificação ANVISA: 80109170031

Para obter, sem custo adicional, as instruções de uso do produto no formato impresso, solicite através dos nossos canais:

SAC:

(11) 5539-7557

Responsável Técnica: Andréa Mesquita Roesse

MEM Cirúrgica Ltda.

TEL: 11 5539-7557 – Email: memcirurgica@memcirurgica.com.br
www.memcirurgica.com.br