

SEQUA HOLD

FECHAMENTO DE FERIDAS E
INCISÕES DE FORMA NÃO INVASIVA

ALÍVIO DE TENSÃO E PREVENÇÃO
DE DEISCÊNCIAS



CONHEÇA NOSSO FORNECEDOR



A Foshan United Medical Technologies Ltd. (UMT) é dedicada ao desenvolvimento e fabricação de produtos avançados para cuidados com feridas e pele.


Fornecendo produtos inovadores com qualidade e processos de fabricação confiáveis. Lançada em 2010, é uma joint venture sino-britânica localizada em Foshan, província de Guangdong, na China.

A UMT é uma empresa conceituada no mercado, estando por trás de alguns produtos de diversas marcas como 3M, Molnlycke, Coloplast e outras.



Indicações: Feridas agudas, lesões cutâneas e incisões cirúrgicas.

Também pode ser aplicado em conjunto com outras suturas, proporcionando alívio de tensão e consequente redução de cicatrizes e prevenção de deiscências (abertura dos pontos)

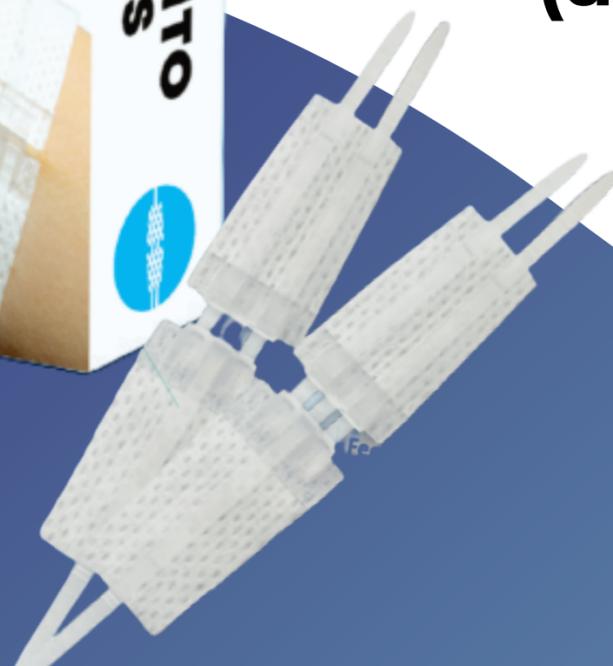

DIMENSÕES

MEM Healthcare


3 tiras de polipropileno

Força ao descolamento: 3.31 N/cm

Cada tira tem 1.5 cm de largura

Cada fecho com força de abertura de mais de 12N

Livre de DEHP (ftalato)

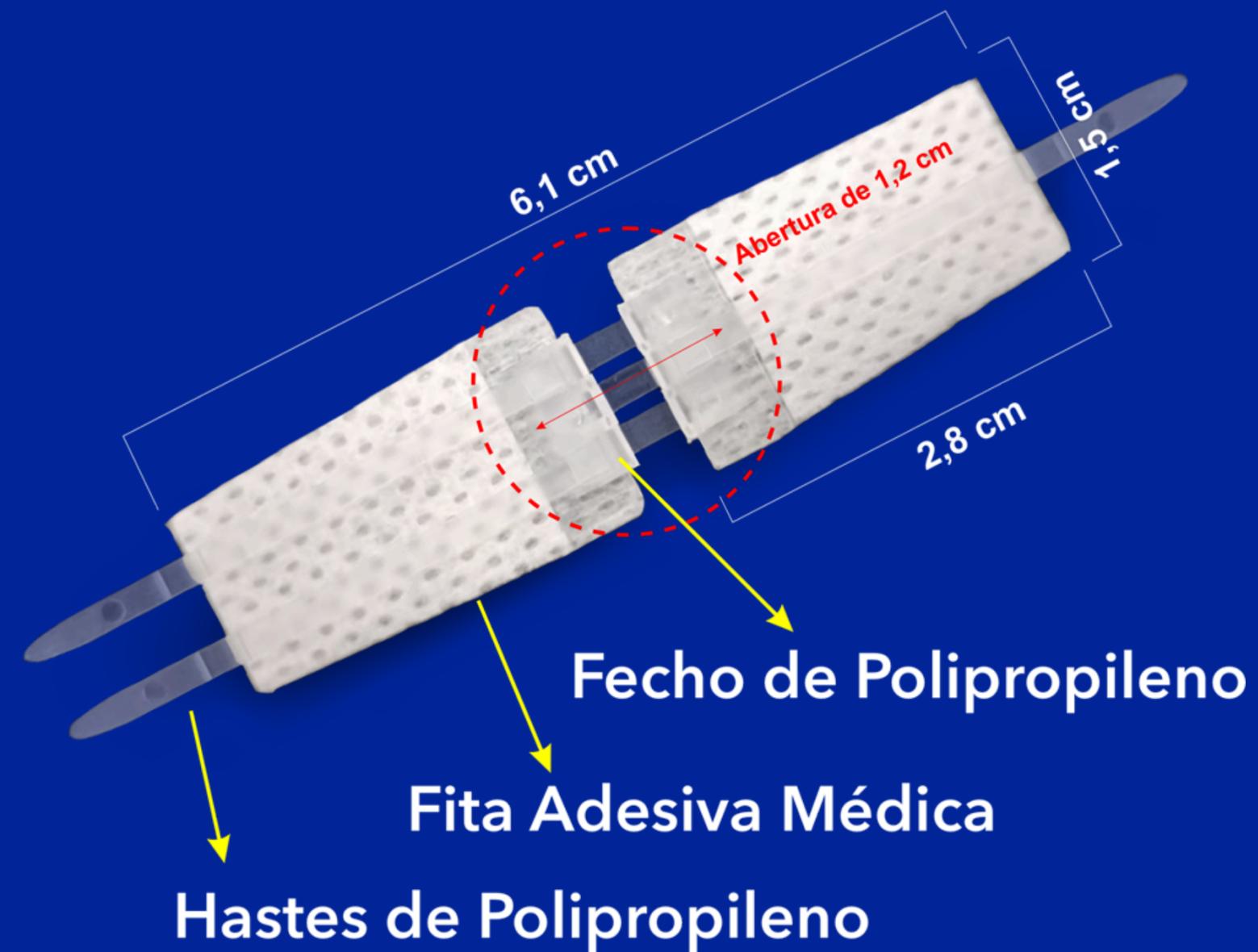

APLICAÇÃO E REMOÇÃO

A fabricante preconiza até 14 dias aderido, porém essa preconização é apenas por conta da resistência do adesivo (não possui nenhuma ação medicamentosa). Portanto, a permanência do dispositivo depende da análise da ferida em questão, sendo que em feridas exsudativas é indicado a troca por novos dispositivos, após nova assepsia, em no máximo 4 dias.

Recomendações importantes:

- Fazer a devida assepsia do local, certificando-se de que a pele esteja limpa e seca antes da aplicação.
- Dispositivo não é impermeável, é necessário fazer uso de uma cobertura para proteção.

Link para o vídeo instrutivo de aplicação:

Vídeo



Para fazer a retirada do dispositivo, comece das extremidades das fitas adesivas, levante e descole da pele lentamente em direção a ferida. Tente descolar a fita junto a superfície da pele, e evite levantar a pele.


CASOS CLÍNICOS

COMPARAÇÃO
FIO X SEQUA



CASOS CLÍNICOS

TRATAMENTO DE DEISCÊNCIAS

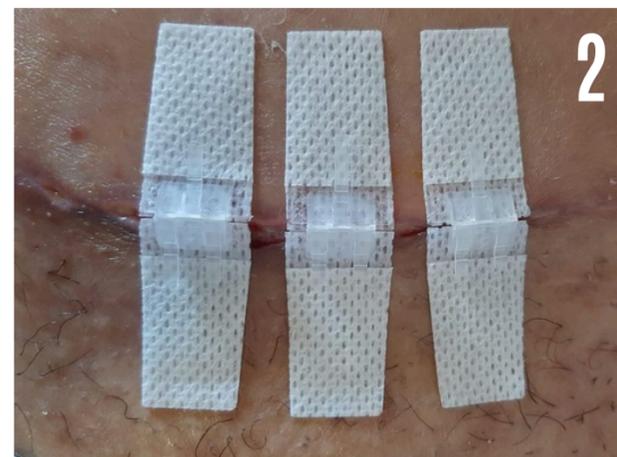

CASOS CLÍNICOS

EMERGÊNCIAS E PS



CASOS CLÍNICOS

PREVENÇÃO DE DEISCÊNCIAS

CIRURGIA PLÁSTICA




CASOS CLÍNICOS

PEQUENAS
INCISÕES



IMPLANTES
HORMONAIS

CIRURGIAS ROBÓTICAS

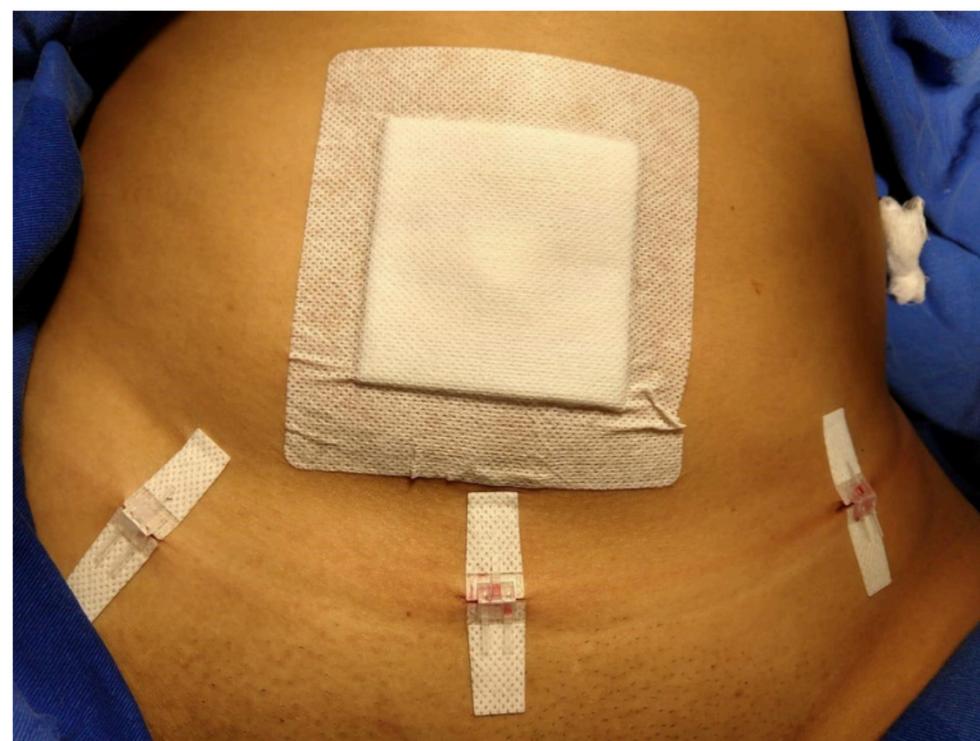

LIPOASPIRAÇÃO



CASOS CLÍNICOS

FERIDAS DE 2º INTENÇÃO




Valores

O Sequa Hold é vendido em caixas com **10 envelopes ESTÉREIS** cada caixa e **frete FOB**

- Caixa de 40 unidades
(4 unidades por envelope)
- Caixa de 20 unidades
(2 unidades por envelope)
- Caixa de 10 unidades
(1 unidade por envelope)



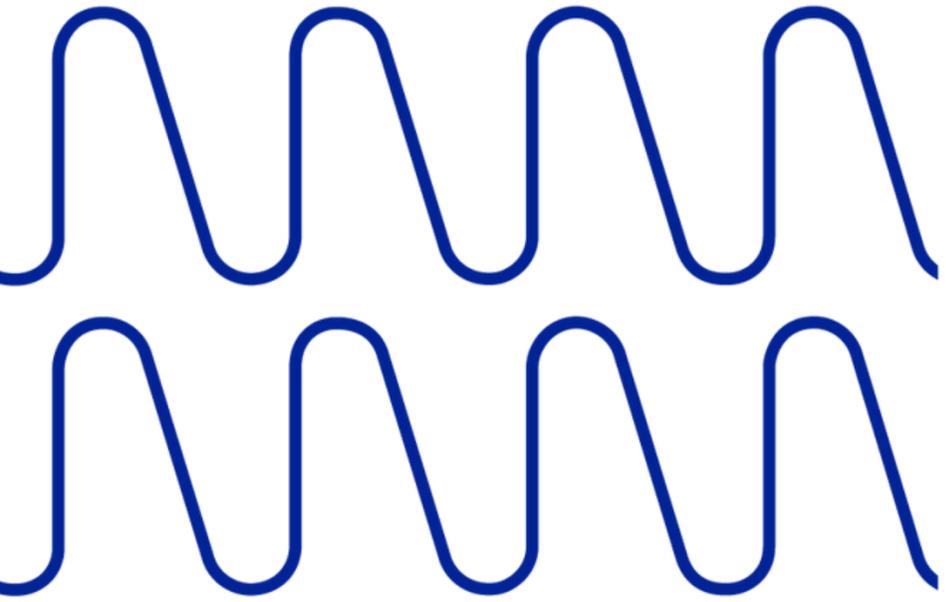

MEM
Healthcare

